

!

Raadpleeg vóór gebruik altijd het document 'Gebruiksaanwijzing' dat bij het product wordt meegeleverd. Als u meer informatie nodig heeft, ga dan naar www.qufora.com/nl/gebruiksaanwijzing.
Neem bij twijfel contact op met uw arts of verpleegkundige voor hulp bij het begeleiden van het irrigatieproces.

Qufora® IrriSedo MiniGo Flex

Beknopte handleiding



Scan om de video
te bekijken en
meer te weten te
komen




Gedistribueerd door
Qufora B.V.
Keizer Karelplein 1
6511 NC Nijmegen
Tel: +31 (0) 24 - 6750925
info@qufora.nl
www.qufora.nl

Qufora® is een gedeponeerd handelsmerk van Qufora A/S, 3450 Allerød, Denemarken.
Alle rechten voorbehouden Qufora A/S, 3450 Allerød, Denemarken.



Hoe Qufora IrriSedo MiniGo Flex te gebruiken

1

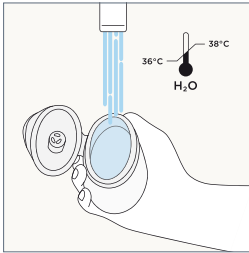


Open het deksel en vul de pomp onder de kraan met lauw kraanwater (36-38 °C) tot aan de binnenrand.

2




Als de pomp tot de binnenrand gevuld is, houd de pomp vast aan het bovenste gedeelte en sluit het deksel totdat je een klik hoort.

3

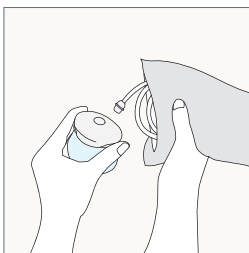

Open het zakje van de conus flex bij de geperforeerde lijn. Terwijl de conus flex nog in het zakje zit, drukt u de conus flex stevig op de kleine ronde opening op het deksel.


4

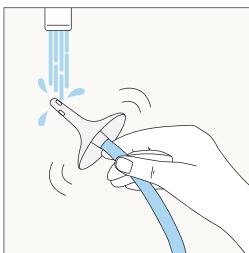

Om het gladde glijmiddel (de hydrofiele coating) op de conus te activeren, maak je de conus flex tot aan de basis enkele seconden lang nat met water.


Knijp zachtjes in de pomp, totdat er water uit de conus komt om te ontluichten. Hij is nu klaar voor gebruik.

5

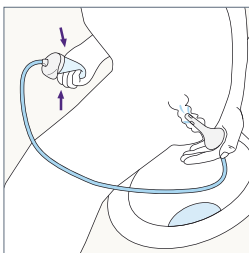


Ga op de wc zitten of hang erboven. Breng voorzichtig de conus flex tot aan de basis in het rectum. De conus flex is nu in de juiste positie. Knijp voorzichtig in de pomp om water in het rectum in te brengen.

6

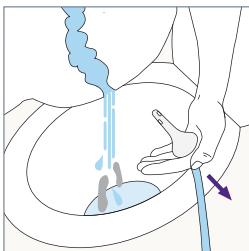

Verwijder de conus flex uit het rectum. Fecale materie en water vallen in de wc.

7

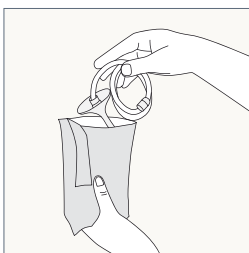

Stop de gebruikte conus flex in het zakje en scheid de twee delen. Je kunt het zakje opvouwen en sluiten met het kleefstrookje. Daarna weggooien met het huishoudelijk afval.

De conus flex is alleen voor eenmalig gebruik is en mag niet worden hergebruikt.

i

Nadat je de MiniGo Flex regelmatig hebt gebruikt, vindt je na een tijdje misschien je eigen manier om het deksel te sluiten

i

De afbeelding toont het inbrengen van de conus flex vanaf de achterkant, door naar achteren te reiken om deze in het rectum te geleiden. Als je dat makkelijker vindt, kun je de conus ook van voren inbrengen, tussen je benen door, en vervolgens in het rectum geleiden.

Reiniging en opslag

Verwijder eventueel achtergebleven water uit de pomp. Reinig indien nodig de buitenkant van de pomp met lauw water en milde zeep en droog af met een pluisvrije doek. Opbergen met geopend deksel.

