



Gebruiksaanwijzing



Qufora® IrriSedo Flow



Qufora A/S
Gydevang 28-30
3450 Allerød
Denmark

Tel: +45 88 300 592
info@qufora.com
www.qufora.com




Qufora® is een geregistreerd handelsmerk van Qufora A/S. © 07/2025.
Alle rechten voorbehouden Qufora A/S, 3450 Allerød, Denemarken.


Gebruiksaanwijzing

Beschrijving van de Qufora IriSedo Flow onderdelen

Waterzak met pomp en water regelaar

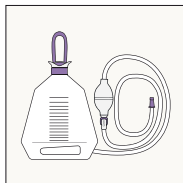

Flow conus

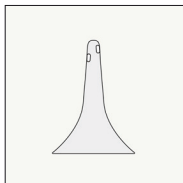

In elkaar gezet



Een waterzak met een pomp en geïntegreerde water regelaar. De waterzak kan tot 1.500 ml water bevatten.


Een Flow conus met hydrofiele coating die wordt geactiveerd met water.

Systeem inclusief water


De Flow conus is voor eenmalig gebruik

De Qufora IriSedo Flow vullen met water


1. Was en droog uw handen.
2. Zorg ervoor dat de water regelaar gesloten is (2a). Houd de hals van de waterzak vast en vul de waterzak met lauwwarm kraanwater (36-38 °C) door het onder de kraan te houden met het deksel open. Om uw systeem gebruiksklaar te maken, heeft u meer water nodig dan u nodig heeft voor uw irrigatie, ongeveer 100-300 ml extra water (2b).
3. Zodra de waterzak gevuld is met de vereiste hoeveelheid water, houdt u de hals van de waterzak vast en drukt u op het deksel totdat deze gesloten is.
4. De waterzak kan overal tussen de vloer en schouderhoogte worden geplaatst. 4a) Het kan op de vloer worden geplaatst of 4b) aan het hengsel worden opgehangen.
5. Open het zakje van de conus bij de geperforeerde lijn. Met de conus nog in het zakje, drukt u de conus stevig op de slangansluiting om uw systeem in elkaar te zetten.
6. Bevestig het lege zakje aan een oppervlak gebruikmakend van de plakstrip aan de achterkant van het zakje.
7. Om het systeem wanneer het hangt met water voor te bereiden, houdt de pomp zo vast dat de water regelaar zich aan de bovenkant bevindt. Open nu de water regelaar. Wanneer de waterzak op de vloer is geplaatst, volg dan de bovenstaande stappen en knijp in de pomp. Wanneer u het water uit de conus ziet stromen, sluit u de water regelaar. Het systeem is nu klaar voor gebruik.
8. Houd de conus onder de kraan of dompel de conus enkele seconden onder water om de hydrofiele coating te activeren.

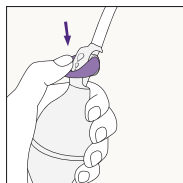

2a

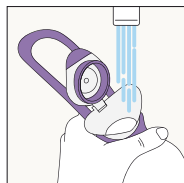


2b

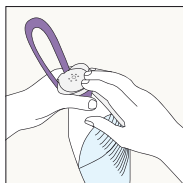


3



4a

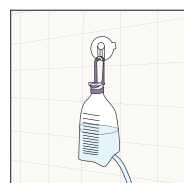


4b

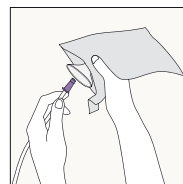

5



6

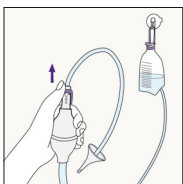


7




8

De Qufora IrriSedo Flow gebruiken


9. Ga op de wc zitten of hang boven de wc. Breng voorzichtig de conus tot aan de basis in het rectum.
10. Blijf de conus op zijn plaats houden en open de waterzak regelaar om water in het rectum in te brengen. Als de waterzak lager is geplaatst dan de toiletbril, knijp dan in de pomp om water in het rectum in te brengen.
11. De hoeveelheid water die de darm instroomt, kan worden gecontroleerd met behulp van de schaalverdeling op de waterzak. Uw arts of verpleegkundige kan u adviseren over de hoeveelheid water die u voor uw irrigatie moet gebruiken. Een algemene richtlijn is 500 ml (dit varieert voor kinderen), maar dit kan meer of minder zijn afhankelijk van wat bij u nodig is. Als u ongemak voelt, breng dan geen water meer in de darm in.
12. Verwijder de conus uit het rectum. Water en fecale materie worden nu geloosd in de wc. Als uw arts of verpleegkundige u dit adviseert, kan de procedure worden herhaald.

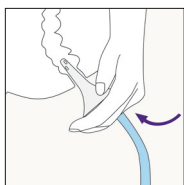


9

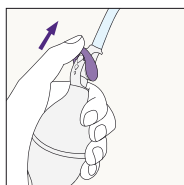

10

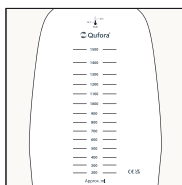


11

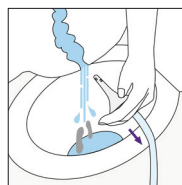


12

De Qufora IrriSedo Flow legen en uit elkaar halen

13. Plaats de gebruikte conus in het zakje en scheid de twee delen.
14. U kunt het zakje vouwen en sluiten met behulp van plakstrip. Daarna weggooien met het huishoudelijke afval. De conus is uitsluitend voor de eenmalig gebruik en mag niet worden hergebruikt.

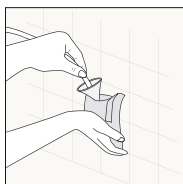


13

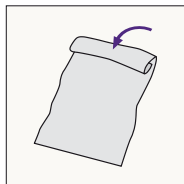

14

Reinigen en opbergen na gebruik


15. Indien nodig kan de buitenkant van het systeem worden gereinigd met lauw water en milde zeep. Droog af met een pluisvrije doek.
16. Leeg de waterzak en hang deze op om te drogen met het deksel open.
17. Bewaar de waterzak met het deksel open.
18. Was en droog uw handen.

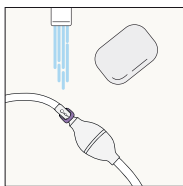

15



16

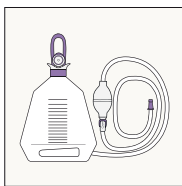

17

Let op: Gebruik de Qufora IrriSedo Flow alleen zoals aanbevolen door uw arts of verpleegkundige.

Gebruiksaanwijzing

Qufora IrriSedo Flow

De Qufora IrriSedo Flow maakt transanale/rectale irrigatie mogelijk. Lees beide pagina's van de gebruiksaanwijzing voordat u de Qufora IrriSedo Flow gebruikt.

Indicaties voor gebruik van transanale/rectale irrigatie

De Qufora IrriSedo Flow is bedoeld voor volwassenen en kinderen van 3 jaar en ouder om fecale incontinentie en/of obstipatie te behandelen. Bijvoorbeeld:

- LAR-syndroom (klachten mogelijk na een endeldarmoperatie)
- Aandring fecale incontinentie/-urgentie
- Obstipatie (langzame doorgang/diopathisch/opioïde geïnduceerd/IBS-C)
- Neurogeen (ruggenmergletsel, bovenste/onderste motorneuronen/MS/ parkinson/spina bifida/cauda equina)

Mogelijk hebben sommige personen in deze groepen hulp nodig van een hulpverlener om de handeling uit te voeren.

Gebruik zoals geadviseerd door uw arts of verpleegkundige

Voor de beste resultaten moet Qufora IrriSedo Flow dagelijks worden gebruikt of zoals geadviseerd door uw arts of verpleegkundige.

Voordat u met transanale/rectale irrigatie begint

Uitsluitend gebruiken na beoordeling en training door een gekwalificeerde arts of verpleegkundige. Een rectaal toucher is verplicht voorafgaand aan uw eerste irrigatie. Uw eerste irrigatie moet u uitvoeren onder toezicht van een ervaren arts of verpleegkundige.

Gebruik transanale/rectale irrigatie niet in de volgende omstandigheden (absolute contra-indicaties):

- Bekende anale of colorectale stenose
- Colorectale kanker/bekkenmaligniteit vóór chirurgische verwijdering
- Acute inflammatoire darmziekte
- Acute diverticulitis
- Binnen 3 maanden na een anale of colorectale operatie
- Binnen 4 weken na een endoscopische polypectomie
- Ischemische colitis

Aangezien de lijst niets alles kan benoemen, moet een arts of verpleegkundige ook altijd individuele patiënt factoren overwegen.

Let op:

Transanale/rectale irrigatie wordt niet aanbevolen:

- Bij zwangerschap of geplande zwangerschap of borstvoeding
- voor kinderen tot 3 jaar.

In de volgende omstandigheden (relatieve contra-indicaties) uitsluitend gebruikmaken van transanale/rectale irrigatie na een zorgvuldig gesprek met de relevante arts:

- Inflammatoire darmziekte (bijv. ziekte van Crohn of colitis ulcerosa)
- Actieve perianale sepsis (fistel of abces, derde- of vierdegraads aambeien)
- Eerdere rectale operatie of operatie aan dikke darm
- Diarree van onbekende etiologie
- Fecale verstopping /zware constipatie. Als de patiënt lijdt aan zware constipatie (fecaal verstopt is), moet er een initiële reiniging van de darmen plaatsvinden voordat met de Qufora IrriSedo Flow transanale irrigatieprocedure wordt gestart.
- Ernstige autonome dysreflexie
- Ernstige diverticulosis of diverticulair abces
- Bestraling van de buik of het bekken
- Langdurige behandeling met steroïden
- Behandeling met antistollingsmiddel
- Lage natriumwaarden in bloed
- Eerdere ernstige bekkenoperatie
- Biopsie van dikke darm in de afgelopen 3 maanden
- Gebruik van rectale medicatie voor andere ziekten die kunnen worden verdund door irrigatie
- Congestief hartfalen

Bijwerkingen en storing van het hulpmiddel

Zoek medische hulp als het volgende wordt ervaren tijdens of na transanale/rectale irrigatie:

- Aanhoudende of ernstige bloeding uit het rectum
- Aanhoudende of ernstige buikpijn of rugpijn, met of zonder koorts

Perforatie van de darmwand komt zeer zelden voor. Het is echter een ernstige en mogelijk dodelijke complicatie van transanale/rectale irrigatie. Onmiddellijke medische aandacht is vereist als dit optreedt. Meld de incidenten aan de bevoegde autoriteit in uw land en/of aan Qufora A/S via QA@qufora.com. Breng Qufora A/S ook op de hoogte in geval van een andere storing van het apparaat.

Neem dit in acht

Transanale/rectale irrigatie kan leiden tot een tijdelijk gevoel van ongemak in de darmen, misselijkheid, rillingen, vermoeidheid, zweten, hoofdpijn en lichte bloeding uit het rectum.

Neem voor nader advies contact op met uw arts of verpleegkundige.

Aanbevolen gebruiksduur

De waterzak met pomp en water regelaar kunnen 30 keer worden gebruikt (gelijk aan 1 maand bij dagelijks gebruik*).

De waterzak met pomp en water regelaar moeten worden vervangen in het geval van verkleuring binnen de aanbevolen gebruiksduur.

De conus is uitsluitend voor eenmalig gebruik

Wanneer de conus wordt hergebruikt dan bestaat er een risico op nadelige effecten voor het product en de gezondheid van de patiënt, de zorgverleners en derden.

Meer informatie over dit product vindt u op www.qufora.com.

*Bij dagelijks irrigeren.